


Ligne artérielle Fresenius C

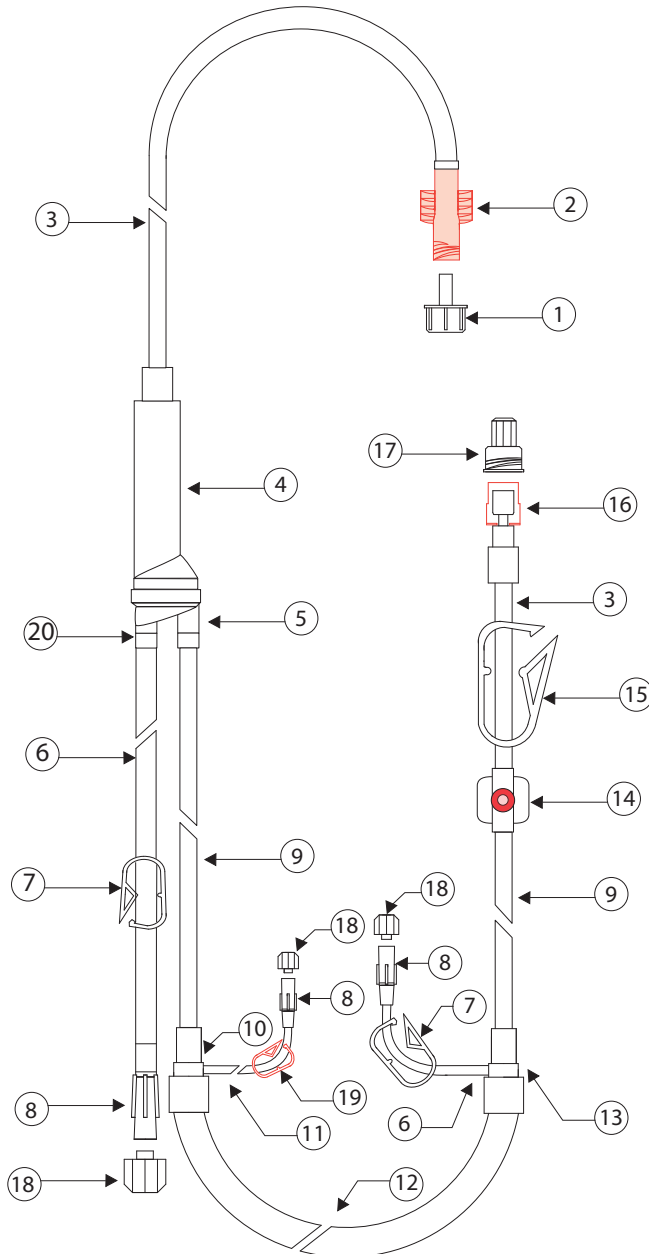

| N° | Désignation composant | Quantité par ligne |
|----|--------------------------|--------------------|
| 01 | Cape dialyse | 1 |
| 02 | Connecteur Dialyse rouge | 1 |
| 03 | Tube Ø4.5 x 6.8 x 1000mm | 2 |
| 04 | Chambre excentrique | 1 |
| 05 | Couvercle Ø30 à 2 voies | 1 |
| 06 | Tube Ø 3 x 5.5 x 100mm | 2 |
| 07 | Clamp moyen | 2 |
| 08 | Luer lock femelle | 3 |
| 09 | Tube Ø 4.5 x 6.8 x 750mm | 2 |
| 10 | Connecteur pompe 2 | 1 |
| 11 | Tube Ø 1 x 2.1x 500mm | 1 |
| 12 | Tube Ø 8 x 12 x360 mm | 1 |
| 13 | Connecteur pompe 5.5 | 1 |
| 14 | Site d'injection rouge | 1 |
| 15 | Clamp GM | 1 |
| 16 | Connecteur patient rouge | 1 |
| 17 | Cape luer | 1 |
| 18 | Cape vissée | 3 |
| 19 | Clamp rouge | 1 |
| 20 | Réduction | 1 |